

NUMAX[®]medical

NUMAX-PATENT-URINAL

INH. S.+ B. Ammon ° Bäumlisackerweg 17 ° CH-3274 Merzligen ° Tel / Fax +41 (0)32 323 16 01
www.inkontinenz-schweiz.ch / www.numax.ch / E/Mail numax@numax.ch


NUMAX PATENT URINAL

Swiss made

Manu Luxe

Best. Nr. M-02-00.1

2

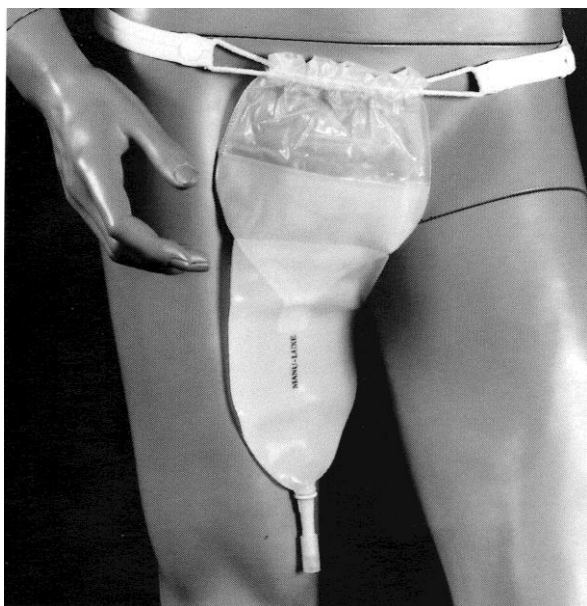

Das **Manu-Luxe** überzeugt vor allem durch seine Einfachheit. Es ist allein einsetzbar oder Abwechslungsweise mit dem (**Männer Urinal**), zur Erleichterung tagsüber. Der untere Teil des Beutels ist ähnlich aufgebaut wie das (**Männer Urinal**) und bietet auch dessen Vorteile :

Rücklaufsicherung
Hygienisches Entleerungsventil


Auch **Sportler** schätzen es :

In Sportarten wo eine Toilette während längerer Zeit nicht erreicht werden kann.
(Bsp. Geeignet für Segelflug- und Hängegleiter-Piloten, Ballon-Fahrer usw.)

Eine extra leichte, verstellbare Taillen-Bandage und das angenehme, hautfreundliche Material des Beutels ergeben einen hohen Tragkomfort.

Das Manu Luxe wird unsichtbar unter der Kleidung getragen.

1. Schritt : Einstellen der Länge der Taillen-Bandage

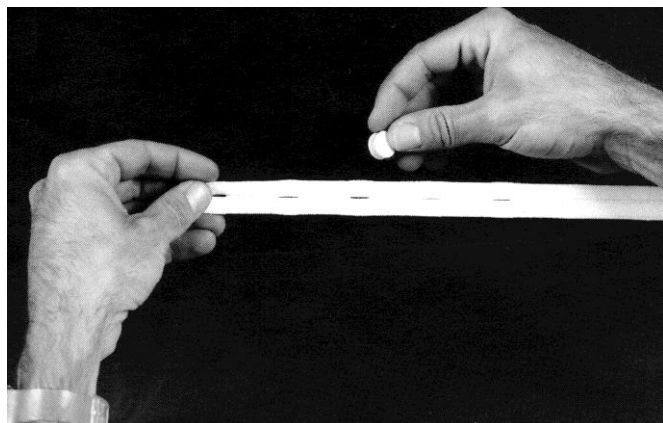


Der Doppelknopf kann im Knopflochband an der gewünschten Stelle eingehakt werden. Ueberstehendes Knopflochband mit der Schere schräg abschneiden.

2. Schritt : Tragen

Das Manu Luxe wird « über alles hinweg » (Penis und Hoden) angezogen und getragen. Entleerungsventil schliessen.

3. Schritt : Entleeren

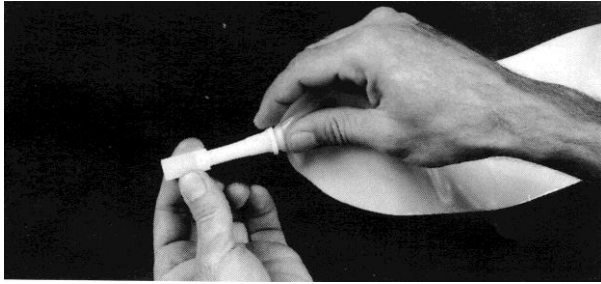

Das Manu Luxe wird dazu nicht ausgezogen.
Entleerungsventil öffnen. Auslaufhülse nach vorne
ziehen (weg vom Beutel).

Pflege :

Für die Reinigung und Pflege des NUMAX PATENT URINAL SYSTEMS empfehlen wir Ihnen **ELBOLIN-SPEZIAL**.
Diese Flüssigseife (die Flasche enthält 250ml) wurde speziell für NUMAX medical entwickelt.

In 40 Grad warmem Wasser und etwas ELBOLIN-Spezial können sämtliche Bestandteile gewaschen werden.

Achtung : Das Entleerungsventil muss während des Waschens geöffnet sein !.

Wichtig !

Die Kunststoff-Bestandteile des NUMAX Systems dürfen nie in zu heissem Wasser gespült werden !

Die optimale Verarbeitung der erstklassigen Materialien bietet Ihnen lange Sicherheit..

Verbrauchs-und Ersatzteile

Bitte das Bestell-Formular verwenden

Best.-Nr.	Artikel
M-26-00.1	Manu Luxe Beutel
M-36-00.1	Taillen-Bandage
G-33-00.1	NUMAX-Pflegeset (ELBOLIN-Spezial und NUMAX.Puder)
G-06-00.1	ELBOLIN-Spezial 250ml
G-07-00.1	NUMAX-Puder

|

Das Manu Luxe System kann erweitert werden. Lassen Sie sich durch uns beraten..

DAS NUMAX PATENT URINAL SYSTEM, ein weltweit patentiertes und erprobtes Produkt zur individuellen Problemlösung !

Weitere **NUMAX medical** Produkte :

Männer Urinal

Für verschiedene Schweregrade von Inkontinenz

Langmanschette mit Entleerung

Geeignet bei leichter Inkontinenz

Langmanschette ohne Entleerung

Für Tag-und Nachtgebrauch bei starker Inkontinenz